


# 24/7-Sicherheitsgehstock – Gebrauchsanweisung

Lesen Sie sich die komplette Gebrauchsanweisung vor der Verwendung durch.

Konsultieren Sie einen Arzt oder eine Ärztin, ob die Verwendung dieses Produkts für Sie geeignet ist.

## Inhalt

1. Gebrauchsanweisung
2. 4 LED-Lichter
3. SOS-Licht
4. SOS-Alarm
5. Handgelenkband
6. Gehstock
7. Gummispitze mit Abriebschutz

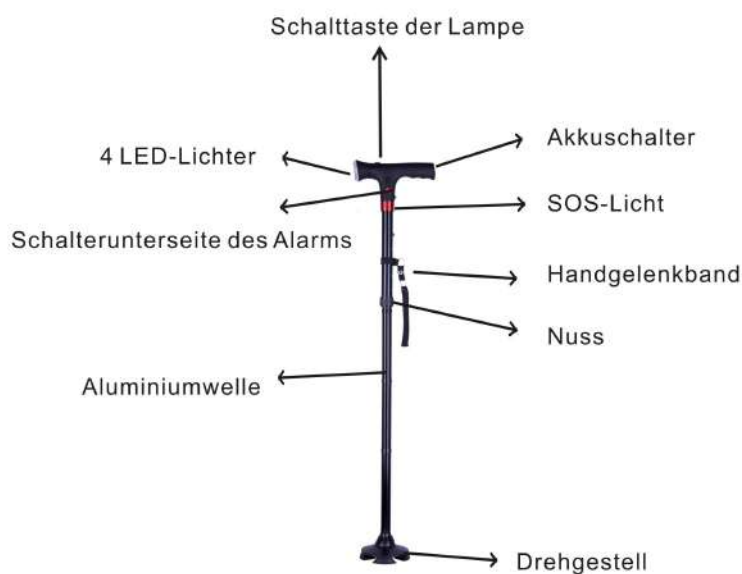

## Anwendung

- Um den Stock zu entklappen, halten Sie den Griff fest und lassen Sie die faltbaren Stielsegmente zum Boden hin ausklappen. Wenn nicht alle Schäfte in den entsprechenden Teilen stecken, ziehen Sie einfach, bis Sie hören, dass alle Segmente an ihrem entsprechenden Platz einrasten.
- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Knopf an der Rückseite des Griffs nach oben drücken und es so entriegeln. Verwenden Sie 2x AAA-Batterien (nicht enthalten) und legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein (Pluspol nach außen, wo sich die Feder befindet). Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie sie nach unten drücken. Dadurch wird das Batteriefach verriegelt und die Batterien bleiben an ihrem Platz.



- Der Gehstock wird mit einem SOS-Alarm geliefert. Um den SOS-Alarm zu aktivieren, drücken Sie die rote Taste an der Seite des Stocks. Sie erreichen sie mit Ihrem Daumen, wenn Sie den Griff des Stocks halten.
- Um die im Stock enthaltene LED-Lampe zu benutzen, drücken Sie einmal auf den roten Knopf, der sich oben auf dem Stock befindet.
- Durch zweimaliges Drücken des roten Knopfes auf der Oberseite des Stocks wird das SOS-Licht zusammen mit den LED-Leuchten aktiviert. Das SOS-Licht leuchtet rot und befindet sich direkt unter der SOS-Alarmtaste. Wenn Sie die Taste 3 Mal drücken, werden alle Lichter ausgeschaltet.
- Das LED-Licht, das am Gehstock angebracht ist, kann nach oben oder unten geschwenkt werden, sodass es entweder nach vorne oder nach unten auf den Boden gerichtet ist (kann nicht im Kreis verwendet werden, da es möglicherweise nicht funktioniert).



- Der Gehstock wird auch mit einer Handschlaufe geliefert, die um das Handgelenk gelegt werden kann, um mehr Sicherheit bei der Verwendung des Stockes zu haben.
- Der Gehstock kann stehend an einem Ort aufbewahrt werden und kann auch durch Zusammenfallen des Stockes aufbewahrt werden. Dazu müssen die 4 einzelnen Segmente des Schaftes vorsichtig getrennt/herausgezogen werden und beim Herausziehen festgehalten werden (seien Sie vorsichtig mit den Fingern, da sie eingeklemmt werden können, wenn sie falsch bewegt werden).
- Wenn die Segmente auseinandergezogen sind, wickeln Sie das Handgelenkband um die Segmente, sodass sich an jedem Ende des Bandes ein Knopf befindet.
- Diese Knöpfe müssen zusammengeklickt werden, um den Stock am Ausklappen zu hindern.

### Höhenverstellung

- Lösen Sie den Drehverschluss, indem Sie ihn mehrmals im Uhrzeigersinn (nach links) drehen. Drücken Sie den silbernen Knopf nach unten und ziehen Sie den Griff nach oben, um die Länge einzustellen, oder drücken Sie den Griff nach unten, um ihn zu verkürzen. Der silberne Knopf ist durch den Einsatz hindurch zu sehen und Sie hören ein Klicken, das bedeutet, dass der Knopf an der richtigen Stelle eingesetzt wurde. Vergessen Sie nicht, den Drehverschluss im Uhrzeigersinn (nach rechts) wieder anzuziehen, nachdem Sie den Stock auf Ihre gewünschte Höhe eingestellt haben.

## Eigenschaften

- Gummispitze mit Abriebschutz verhindert ein Stürzen (rutschfest)
- Roter Panikknopf (löst im Notfall sowohl eine laute Sirene als auch ein rotes Stroboskoplicht aus)
- schwenkbarer, ultraheller Scheinwerfer, LED-Taschenlampe beleuchtet Ihren Weg (benötigt 2x AAA-Alkalibatterien (nicht enthalten)).
- Zusammenklappbar und kompakt: leicht in 4 Segmente zu falten, um sie zu verstauen und für unterwegs oder auf Reisen griffbereit zu haben
- der Gehstock kann sich selbständig halten, ohne auf die Seite zu fallen
- hat einen weichen, festen Griff und ein Handgelenkband für eine bessere Kontrolle
- aus leichtem Aluminium gefertigt
- höhenverstellbar von 84 cm bis 94 cm
- breiter schwenkbarer Sockel für Stabilität
- Ihr Stock ist leicht auf ein praktisches Reiseformat zusammenklappbar

## Achtung

- Batterien nicht enthalten
- Maximales Gewicht beträgt 109 kg
- Schneiden Sie das Gummiband im Inneren des Stocks NICHT durch, da dies dazu führt, dass der Stock auseinanderfällt und beschädigt wird (das Gummiband kann nicht ersetzt werden).
- Beenden Sie die Verwendung des Stocks sofort, wenn das Gummiband geschnitten, ausgefranst oder beschädigt ist.
- NICHT auf nassen oder rutschigen Flächen verwenden, da dies zum Ausrutschen und Stürzen führen kann.
- Dehnen Sie das Kabel NICHT mehr als nötig, um es zu befestigen oder zu entfernen.
- Lassen Sie die Gehstöcke NICHT nass oder feucht werden, da dies zu Schäden führen kann (Licht und SOS-Ton funktionieren möglicherweise nicht).
- Beenden Sie die Verwendung des Produkts, wenn Sie spüren, dass der Griff durch die Batterien heiß wird.
- Verwenden Sie das am Produkt angebrachte Licht nicht über einen längeren Zeitraum hinweg.

- Die maximale Körpergröße einer Person, die den Gehstock benutzen kann, beträgt etwa 1,80 m.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da die Teile, die im Stock enthalten sind, nicht austauschbar sind.
- Die LED-Lampe am Gehstock ist nicht austauschbar.
- Entfernen Sie alle leeren Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
- Überprüfen Sie den Stock regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß, einschließlich des Ausfransens der elastischen Bänder oder der Abnutzung der Gummifüße. Wenn Sie Anzeichen von Verschleiß sehen, beenden Sie die Verwendung sofort.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien.